


NOTE

- In order to ensure proper operation, do not use this meter close to strong sources electromagnetic radiation.
- Keep the meter free of dust and liquids, including water.

3 > Preparing the Lancing Device


- 1) Hold the depth adjustable cap in one hand and hold the hub in the other hand. Bend the cap towards the down side, until a gap appears between the cap and hub.
- 2) Pull the cap and hub off in opposite directions, remove the cap.
- 3) Insert a new disposable lancet firmly into the lancet carrier.

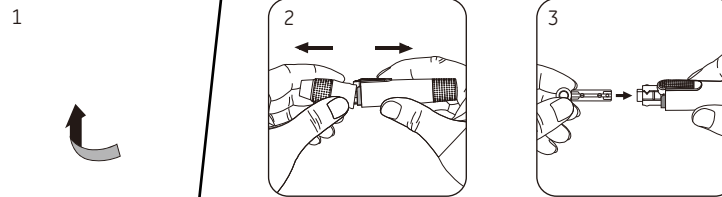

- 4) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.
- 5) Replace the adjustable depth cap.
- 6) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the adjustable depth cap to the desired depth setting. Your setting should be based on your skin type:

- " " for soft or thin skin;
- " " for average skin;
- " " for thick or calloused skin.

- 7) Hold the base in one hand and pull on the plunger with the other hand. Release the plunger and it will automatically move back to its original position near the base. The device will be cocked.

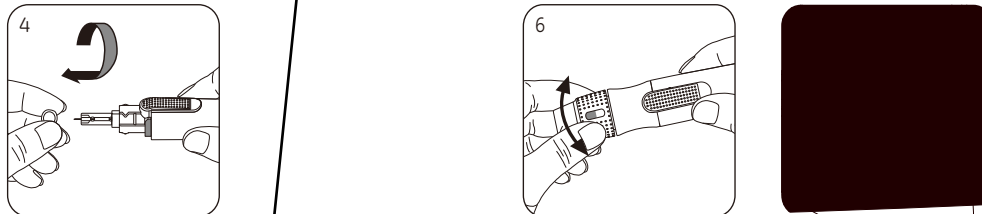

4 > Performing a Test



1 > Installing the Batteries

- 1) Turn the meter over. Press the battery cover to open.
- 2) Install the two CR2032 batteries. Be sure to insert the batteries in the correct direction.
- 3) Put the battery cover back on until it snaps into place.


2 > Setting Up Your Meter - Setting the Date, Time and Volume

- 1) Press and release the Main button "⊙" to turn on the meter.
- 2) Press and hold the Main button "⊙" for 7 seconds to enter the Setting Mode. The year will flash. (Note: The meter will turn off while you are holding down the button. Continue holding down the Main button to reach the Setting Mode. You will then be asked to set the year.)
- 3) Press the Left button "⊙" or Right button "⊙" to change the year.
- 4) Press the Main button "⊙" to confirm the year and move onto the month setting.

- 5) Repeat step 3 and 4 to change the date, time format, hour, minute and volume. After pressing the main button to confirm the volume setting, your set-up is complete.

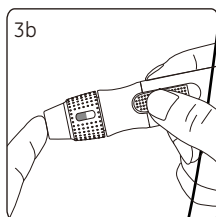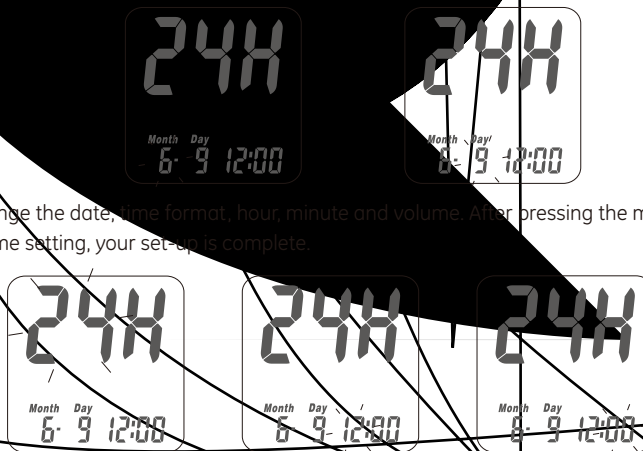


Guide d'introduction du Lecteur de glycémie GE200 (pour auto-évaluation)

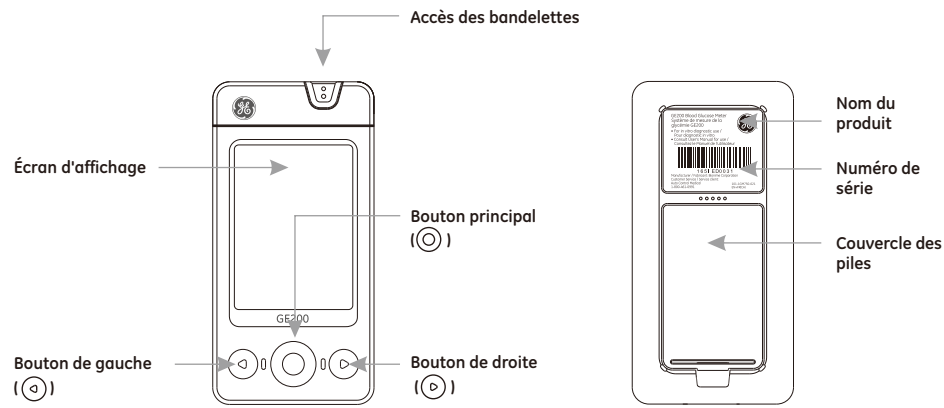


Vue avant du lecteur

Vue arrière du lecteur

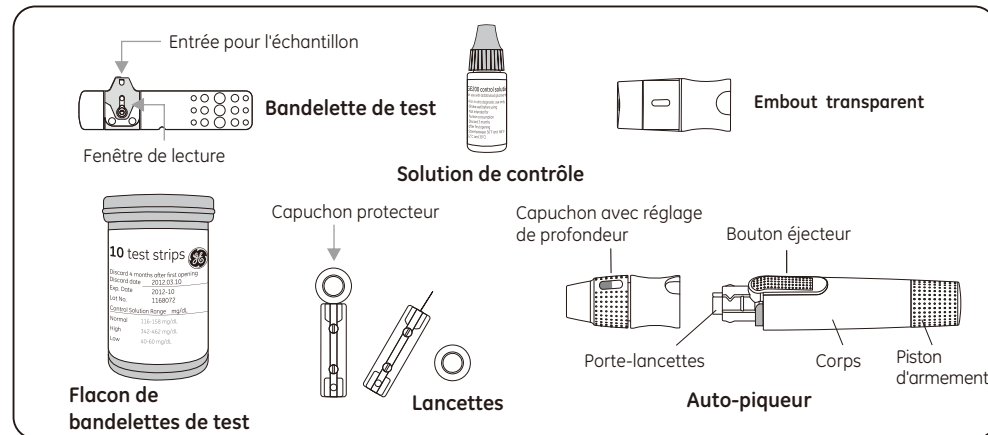

1 Mise en place des piles

- 1) Retournez le lecteur. Appuyez le couvercle des piles pour l'ouvrir.
- 2) Installez les 2 piles. Veillez à installer les piles dans le bon sens.
- 3) Mettre le couvercle des piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


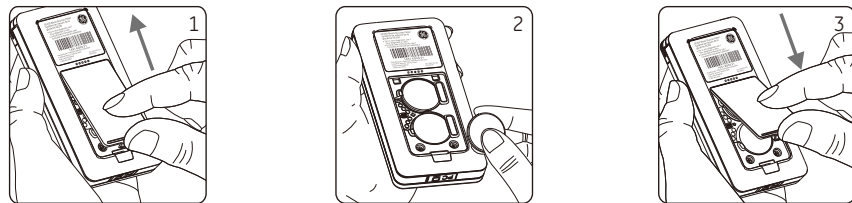


2 Réglage du lecteur. Configurer la date, l'heure et le volume.

- 1) Appuyez puis relâchez le bouton principal "⊙" pour mettre en marche le lecteur.
- 2) Appuyez et maintenez la pression sur le bouton principal "⊙" pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous accédiez au menu réglage. Avant de rentrer dans le menu réglage, l'appareil s'éteint d'abord. Veuillez continuer à appuyer jusqu'à rentrer dans le menu réglage. L'affichage de l'année clignotera.
- 3) Pressez le bouton gauche "⊖" ou le bouton droit "⊕" pour régler l'année.
- 4) Pressez le bouton principal "⊙" pour confirmer le réglage de l'année et accéder au réglage du mois.



- 5) Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les paramètres date, format de l'heure, l'heure, les minutes et le volume. Après avoir appuyé sur le bouton principal pour confirmer le réglage du volume, votre réglage est terminé.

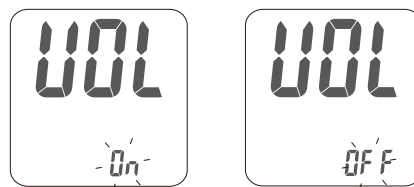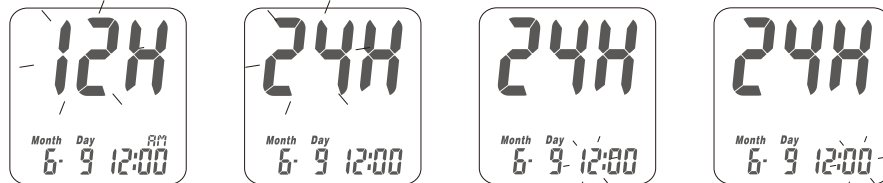


NOTE

- On conseille de ne pas utiliser ce lecteur près d'une source de forte radiations électromagnétiques, pour éviter toutes interférences avec le bon fonctionnement du lecteur.
- On conseille de préserver le lecteur de la poussière, de l'eau ou d'autres liquides.

3 Préparation de l'autopiqueur


- 1) Tenez le capuchon avec le réglage de profondeur d'une main et l'autre partie de l'autopiqueur de l'autre. Pliez le capuchon vers le bas jusqu'à ce qu'un espace apparaisse entre le capuchon et l'autre partie de l'autopiqueur.
- 2) Tirez le capuchon et l'autre partie de l'autopiqueur dans des directions opposées, et retirez le capuchon.
- 3) Insérez fermement une nouvelle lancette dans le porte-lancettes.

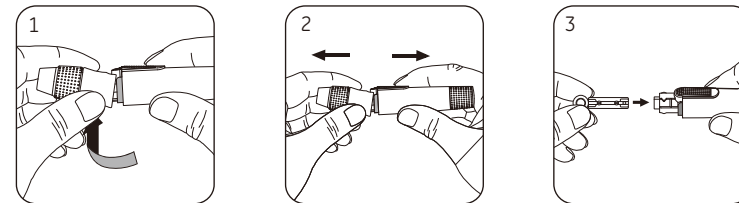

- 4) Dévissez le capuchon protecteur de la lancette jetable et le mettre de côté.
- 5) Remettre le capuchon avec réglage de profondeur.
- 6) Choisir la profondeur de ponction en tournant la partie haute du capuchon avec réglage de profondeur afin que le réglage de la profondeur choisie apparaisse dans la fenêtre. Les réglages sont basés sur le type de peau.



- "⊖" pour une peau douce ou fine;
- "⊕" pour une peau moyenne;
- "⊕⊕" pour une peau épaisse et calleuse.

- 7) Maintenez le corps de l'auto-piqueur dans une main et tirez le piston d'armement de l'autre. L'auto-piqueur est armé. Relâchez le piston, il reviendra automatiquement à sa position initiale.

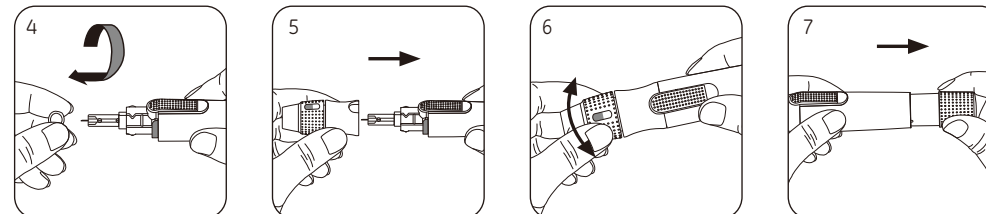

4 Réaliser un test


- 1) Lavez-vous les mains et séchez-les. Prenez une bandelette du flacon. Refermez-le flacon immédiatement.
- 2) Insérez la bandelette dans l'accès prévu à cet effet avec le symbole indicateur face à vous. Introduire la bandelette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et bute. Le lecteur détectera automatiquement le numéro de code.
- 3) Quand vous voyez le symbole de la goutte de sang clignoter, positionnez l'auto-piqueur latéralement sur l'extrémité de votre doigt et pressez le bouton éjecteur.

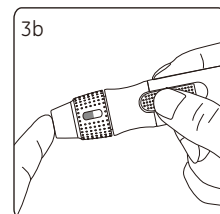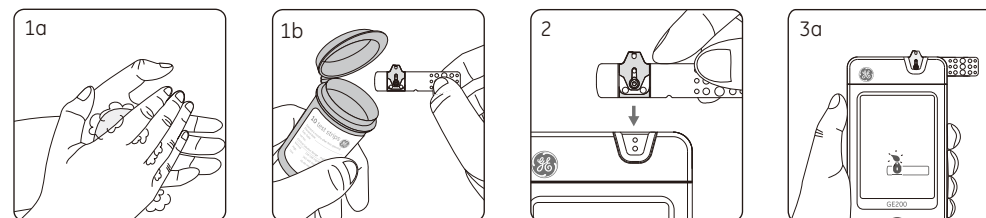


Exemple de taille d'échantillon:



- 4) Veuillez prélever un échantillon entre 0.75 µL et 3.0 µL pour réaliser le test. Veuillez consulter l'exemple de taille d'échantillon ci-dessus. Des échantillons de sang supérieurs à 3.0 µL peuvent contaminer le lecteur. Un échantillon de 0.75 µL minimum est nécessaire pour obtenir un résultat précis.

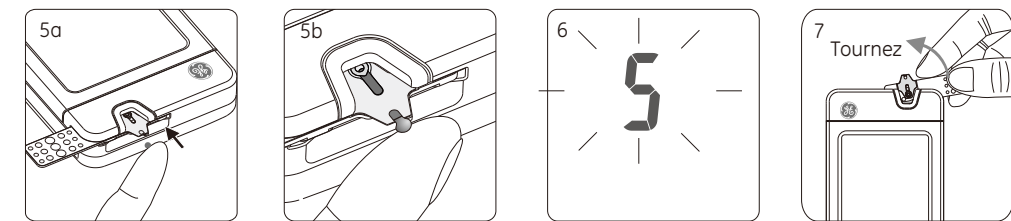


- 5) Rapprochez et maintenez la goutte de sang à côté de l'entrée pour l'échantillon sur la bandelette jusqu'à entendre un " bip " et voir la fenêtre se remplir totalement de sang. Si la fenêtre n'est pas totalement remplie de sang ou si le test n'a pas commencé, jetez la bandelette et répétez le test avec une nouvelle bandelette de test.
- 6) Vous verrez le compte à rebours apparaître sur votre écran. Après 5 secondes, Le résultat du test apparaît. Pour plus d'informations concernant vos résultats, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur.
- 7) Retirez la bandelette de test du lecteur. Veuillez respecter la réglementation en vigueur et jetez correctement la bandelette usagée.
- 8) Retirez le capuchon avec réglage de profondeur. Sans toucher la lancette jetable usagée, plantez-la dans le capuchon protecteur.
- 9) Pressez le bouton éjecteur d'une main et tirez le piston d'armement de l'autre, cela éjectera en toute sécurité la lancette jetable usagée.
- 10) Jetez la lancette jetable usagée dans un récipient approprié résistant aux perforations et réservé aux déchets comportant des risques biologique.
- 11) Remettez en place le capuchon avec réglage de profondeur, une fois le test terminé.

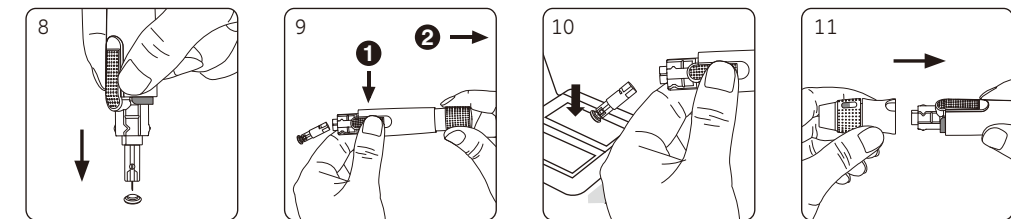

La paume de la main ou l'avant-bras comme site de prélèvement

1. Choisissez l'embout transparent et suivez les étapes 1 à 2 du #4 "Réaliser un test".
 2. Massez la zone de ponction de la paume ou de l'avant-bras durant quelques secondes.
 3. Immédiatement après, appuyez et maintenez l'auto-piqueur avec le bouchon transparent contre la paume ou l'avant-bras.
 4. Pressez alors le bouton éjecteur.
 5. Maintenez toujours l'auto-piqueur contre la paume ou l'avant bras et augmentez progressivement la pression durant quelques secondes jusqu'à ce que l'échantillon de sang soit suffisant.
 6. Veuillez suivre l'étape 9 pour jeter correctement la lancette jetable.
- NOTE:** NE PAS procéder à un test sur un site alternatif tel que la paume de la main ou l'avant-bras si vous testez pour de l'hypoglycémie (bas niveau de glucose).

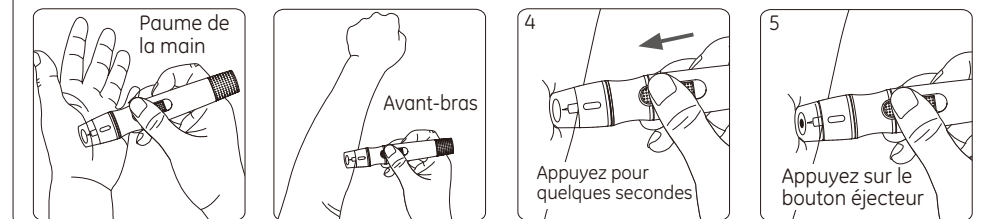

NOTE

- L'autopiqueur GE est destiné à son usage sur une seule personne.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation du lecteur et l'interprétation des résultats, veuillez lire attentivement le Manuel de l'utilisateur du Lecteur de glycémie GE200.



GE is a trademark of General Electric Company and is used under license by Bionime Corporation, NO. 100, Sec. 2, Daqing Street, South District, Taichung City 40242 Taiwan (R.O.C)

GE est une marque de commerce de la compagnie General Electric et est utilisée sous licence par Bionime Corporation, NO. 100, Sec. 2, Daqing Street, South District, Taichung City 40242 Taiwan (R.O.C.)

Manufacturer / Fabricant : BIONIME CORPORATION, No. 100, Sec. 2, Daqing Street, South District, Taichung City, Taiwan 40242

Made in Taiwan/ Fabriqué à Taiwan

Distribution and Customer Service in Canada by/ Distribution et service à la clientèle au Canada: Auto Control Medical www.autocontrol.com 6695 Millcreek Drive, unit 6, Mississauga, On L5N 5R8, Toll-free/Sans frais: 1-800-461-0991

101-3GM750-042 EN+FR(CA)